

KULMBACHER



ANATOMISCHE CERVICALSTÜTZE mit Verstärkung

Orthese zur Stabilisierung
der Halswirbelsäule

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:
23.12.03.1030

Indikationen:

- HWS Distorsion · chronisches HWS Syndrom · akutes HWS Syndrom · Cervicalsyndrom · akutes Cervicalsyndrom mit Steilstellung der HWS · Massiver Schiefhals · Chronisches HWS Syndrom mit Spondylose, Spondylarthrose · Schädelprellung
- Torticollis · Schleudertrauma, Cephalgie

Wirkungsweise und Eigenschaften:

Die anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung ist ein – zirkulär mit Haftverschluß zu schließender – körperformgerechter Schaumstoffkragen mit einem Stabilisierungselement. Die Halskrawatte entlastet die Nackenmuskulatur, fördert die Restitution und ergänzt durch Immobilisation die medikamentöse und physikalische Therapie bei HWS-Syndrom und Distorsionen.

Die hautfreundlichen Halskrawatten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Keine Einschnürung an den Rändern
- Vermeidung von lokaler Druckbelastung
- Stabilisierung in geeigneter Stellung
- Deutliche Entlastung der Muskulatur

Rezeptierung:

KULMBACHER anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung HMV-Pos. Nr. 23.12.03.1030

Art. Nr. M 220

Größeneinteilung:

Entsprechend der Höhe der Cervicalstütze gibt es 3 Größen.

Höhe in cm	Umfang in cm
<input type="checkbox"/> 8 cm	universell
<input type="checkbox"/> 10 cm	universell
<input type="checkbox"/> 12 cm	universell

Zusammensetzung: Schaumstoff-Kern: Polyether; Verstärkung: Polyethylen;
Überzug: Baumwolltrikotbezug. Waschbar bei 30° Celsius mit einem Feinwaschmittel ohne Weichspüler.
Nicht im Trockner, auf Heizungen oder direkt in der Sonne trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln.
Den Kontakt mit fett- oder säurehaltigen Mitteln oder Salben vermeiden.

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. Die anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung ist ausschließlich für die oben genannten Indikationen einzusetzen.

Ein Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.



DIN EN ISO 9000
Zertifiziert

seit
1929

KULMBACHER
SCHÄFTEFABRIK

Luitpoldstr. 13
95326 Kulmbach

Tel. 09221/74623 · Fax -65985
www.kulmbachermed.com

Gebrauchsanweisung KULMBACHER anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung

Zweckbestimmung des Produktes:

Die Kulmbacher anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung ist ausschließlich einzusetzen für

- Stabilisierung der HWS
- Einschränkung unzuträglicher Bewegung der HWS

Indikation und Wirkungsweise:

-HWS Distorsion -chronisches HWS Syndrom -akutes HWS Syndrom -Cervicalsyndrom -akutes Cervicalsyndrom mit Steilstellung der HWS -Massiver Schiefhals -Chronisches HWS Syndrom mit Spondylose Spondylarthrose -Schädelprellung -Torticollis - Schleudertrauma, Cephalgie

Die anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung ist ein- zirkulär mit Haftverschluss zu schließender- körperformgerechter Schaumstoffkragen mit einem Stabilisierungselement. Die Halskrawatte entlastet die Nackenmuskulatur, fördert die Restitution und ergänzt durch Immobilisation die medikamentöse und physikalische Therapie bei HWS-Syndrom und Distorsionen.

Die hautfreundlichen Halskrawatten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Keine Einschnürung an den Rändern
- Vermeidung von lokaler Druckbelastung
- Stabilisierung in geeigneter Stellung
- Deutliche Entlastung der Muskulatur

Auswahl der Größe:

Größeneinteilung:

Entsprechend der Höhe der Cervicalstütze gibt es 3 Größen.

Höhe in cm	Umfang in cm
8 cm	universell
10 cm	universell
12 cm	universell

Lieferumfang:

Eine anatomische Cervicalstütze mit Verstärkung, Gebrauchsanweisung, Produktinformation.

Anlegen der Bandage:

- 1) Öffnen des Klettverschlusses, der sich an der Rückseite befindet
- 2) Nehmen Sie die Enden der offenen Orthese und legen Sie die Orthese um ihren Hals, so daß der Klettverschluß am Hinterkopf aufeinander gelegt und geschlossen wird.
- 3) Durch das Schließen der Orthese mit dem Klettverschluß können Sie bestimmen, wie stark der Druck oder die Stabilisierungswirkung sein soll.
- 4) Mit dem Klettverschluß der Orthese kann die Stabilisierungswirkung individuell verändert werden, z.B bei verschiedenen Tätigkeiten im Laufe eines Tages.

Anwendungshinweise:

Durch das Tragen der anatomischen Cervicalstütze mit Verstärkung kann es anfänglich zu erhöhtem Druckgefühl kommen, was normal ist, solange der Druck nicht schmerzhaft ist. Schon nach einiger Zeit paßt sich das Material optimal dem Körper an.

Die Tragezeit sollte 12 Stunden am Stück nicht überschreiten. Die Orthese dient der Stabilisierung bei Belastung, in längeren Ruhezeiten, z.B. während des Schlafes, wird die Orthese in der Regel nicht getragen.

Reinigungshinweise und Angabe des verwendeten Materials:

Pflegehinweise:

Die Orthese ist waschbar bei 30 Grad Celsius in der Waschmaschine mit einem Feinwaschmittel ohne Weichspüler. Beim Waschen muß der Klettverschluß geschlossen sein.

Nicht im Trockner, auf Heizungen oder direkt in der Sonne trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln. Den Kontakt mit fett- oder säurehaltigen Mitteln oder Salben vermeiden.

Verwendete Materialien:

FCKW-frei hergestellter, formstabiler Polyether Schaumstoff als Stabilisierungsmaterial mit einem Raumgewicht von 45 Kg/m³.

Verstärkung: Polyethylen. Überzug: Baumwolltrikotbezug

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen

Stauungsödem

Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich des Verschlusses kommt. Dieser darf nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Jede dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker oder Arzt.

Wartung/Tragedauer:

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Klettwirkung kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach ca. 6 Monaten Tragezeit kann eine neue Bandage indiziert sein. Regelmäßiges Waschen erhöht die Haltbarkeit der Bandage.

Gewährleistung:

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Es wird die gesetzliche Gewährleistung gegeben in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Konformitätserklärung:

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die KULMBACHER anatomische Cervicalstütze die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt.

Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623

Fax: 09221/65985 www.kulmbachermed.com

Hersteller: Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

Meldepflicht: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021_05_26

