

KULMBACHER

FINGER- ORTHESE



- Fingergelenkstütze zur Fixierung von einem oder zwei Fingern

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

23.07.01.0007

Indikationen:

- Zur Ruhigstellung bei Verletzungen und Erkrankungen von Fingern und nach operativen Eingriffen.

Wirkungsweise und Eigenschaften:

- Verformbare Alu Schiene als volarer Stabilisator zur Lagerung der Finger.
- Hautfreundliche atmungsaktive Polsterung.
- Vermeidung immobilitätsbedingter Kontrakturen der Fingergelenke.
- Rasche Applikation.
- Vier Klettverschlüsse für eine optimale Fixierung.
- Variable Positionierung der Klettverschlüsse an Mittelhand und Fingern.

Rezeptierung:

KULMBACHER Fingerorthese Art. Nr. M 156
 HMV-Pos. Nr. 23.07.01.0007

Größeneinteilung:

Messpunkt/Längenmaß: Beginn der Handfläche (innen) bis Ende des Fingers
 Entsprechend dem Längenmaß gibt es 3 Größen und eine Kindergröße.

Länge in cm	Größe
<input type="checkbox"/> 11-14 cm	Kinder
<input type="checkbox"/> 13-16 cm	1
<input type="checkbox"/> 16-19 cm	2
<input type="checkbox"/> 19-22 cm	3

Zusammensetzung: Anpassbare Alu Schiene, Baumwolle, Polyester, Polyamid.
 Waschbar bei 30° Celsius mit einem Feinwaschmittel ohne Weichspüler.
 Nicht im Trockner, auf Heizungen oder direkt in der Sonne trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln. Den Kontakt mit fett- oder säurehaltigen Mitteln oder Salben vermeiden.

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Fingerorthese mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. Die Fingerorthese ist ausschließlich für die oben genannten Indikationen einzusetzen. Ein Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.



DIN EN ISO 9001:2008
Zertifiziert

seit
1929

KULMBACHER
 SCHÄFTEFABRIK

Luitpoldstr. 13
 95326 Kulmbach

Tel. 09221/74623 · Fax -65985
 www.kulmbachermed.com

Gebrauchsanweisung KULMBACHER Fingerorthese

Zweckbestimmung des Produktes (Einsatzorte):

Die Kulmbacher Fingerorthese ist ausschließlich für die Stabilisierung und Ruhigstellung von Fingern einzusetzen.

Indikation und Wirkungsweise:

Die Fingerorthese dient der Ruhigstellung bei Verletzungen und Erkrankungen von Fingern und nach operativen Eingriffen.

Auswahl der Größe:

Es gibt drei Größen für Erwachsene und eine Größe für Kinder.

Lieferumfang:

Eine Fingerorthese, Gebrauchsanweisung, Produktinformation.

Anlegen der Orthese (Montageanweisung):

Legen Sie die geöffnete Orthese an das Handgelenk und Fingergelenk mit der Schienenseite unter der Hand. Bei Bedarf kann die Alu Schiene in eine gewünschte Form gebogen werden. Legen Sie die zu versorgenden Finger auf die Orthese. Schließen Sie zunächst die Klettverschlüsse im Bereich der Finger, darauf den Klettverschluß am Handgelenk und schließlich den Klettverschluß an der Mittelhand. Bei längerem Tragen regelmäßig auf mögliche Einschnürungen am unteren oder oberen Rand der Klettverschlüsse prüfen

Anwendungshinweise:

Die Fingerorthese ist in 3 Erwachsenen-Größen und in 1 Kinder-Größe erhältlich.

Reinigungshinweise und Angabe des verwendeten Materials:

Die Orthese kann mit einer milden Seife und mit der Hand bei 30Grad Celsius gewaschen werden. Nicht über direkter Wärmequelle trocknen.

Verwendete Materialien: Baumwolle, Polyester, Polyamid, Anpassbare Aluschienen.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen

Stauungsödem

Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich der Verschlüsse kommt. Diese dürfen nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Jede dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker oder Arzt.

Wartung/Tragedauer:

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Haftung der Klettbänder kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach ca. 6 Monaten Tragezeit kann eine neue Orthese indiziert sein. Regelmäßiges Waschen erhöht die Haltbarkeit der Orthese.

Gewährleistung:

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Es wird die gesetzliche Gewährleistung gegeben in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Konformitätserklärung:

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die KULMBACHER Fingerorthese die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt..

Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623

Fax: 09221/65985 www.kulmbachermed.com

Hersteller: Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

Meldepflicht: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021_05_26

