

KULMBACHER

KNIEBANDAGE mit Pelotte



- Kompression (Gestrick), Stabilisierung (Seitliche Spiralen), Druckumverteilung (Elastische Pelotte)
- Erhöhung des Drucks im Gewebe, damit beschleunigter Abbau von Ödemen und Hämatomen
- Verbesserung der Durchblutung und Versorgung der Haut und tieferen Gewebsschichten
- Intensiver Hautkontakt als Voraussetzung für die Beeinflussung von Haut- und Propriozeptoren

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

05.04.01.0093

Indikationen:

- Leichte Instabilitäten des Kniegelenks - Gelenkergüsse und Schwellungen - Chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände
- Chondropathia patellae - Verschleißbedingte Gefügelockerungen - Arthrose und Arthritis - Meniskusschädigungen
- Femoropatellares Schmerzsyndrom

Wirkungsweise:

Die durch das kompressive Gestrick und die elastische Einlage erreichte Massagewirkung verbessert die Durchblutung und führt zu einer schnelleren Resorption von Hämatomen und Ödemen. Die formgestrickte Kniebandage verbessert die Propriozeption und erreicht dadurch eine Verbesserung der muskulären Unterstützung. Die seitlich angebrachten Spiralfedern stabilisieren das Kniegelenk und reduzieren das Rutschen der Bandage in der Bewegung.

Eigenschaften:

- Formgestrickte Bandage, längs- und querelastisch
- Entlastung, Komprimierung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Intensiver Hautkontakt als Voraussetzung für die Beeinflussung von Haut- und Propriozeptoren (Propriozeptive Wirkung)
- Durchblutungsverbesserung des Gelenkbereichs
- Beschleunigter Abbau von Ödemen und Hämatomen durch Erhöhung des Drucks im Gewebe

Rezeptierung:

KULMBACHER Kniebandage mit Pelotte (Art. Nr. M 130)

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr. 05.04.01.0093

Größeneinteilung:

Es gibt 4 Größen entsprechend dem Knieumfang:

(Umfang Kniemitte über Patella gemessen)

Größe	Knieumfang in cm
<input type="checkbox"/> 1 (S)	30-34 cm
<input type="checkbox"/> 2 (M)	34-38 cm
<input type="checkbox"/> 3 (L)	38-42 cm
<input type="checkbox"/> 4 (XL)	42-46 cm

Washbar bei 30° Celsius mit einem Feinwaschmittel ohne Weichspüler. Nicht im Trockner, auf Heizungen oder direkt in der Sonne trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln. Den Kontakt mit fett- oder säurehaltigen Mitteln oder Salben vermeiden. Material: 38% Nylon, 13% Polyester, 12% Gummi, 7% Spandex, 15% TPR (Pelotte), 15% Stahl (Seitliche Spiralen)

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Kniebandage mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. Die Kniebandage ist ausschließlich für die oben genannten Indikationen einzusetzen. Ein Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifiziert

seit
1929

KULMBACHER
SCHÄFTEFABRIK

Luitpoldstr. 13
95326 Kulmbach

Tel. 09221/74623 · Fax -65985
www.kulmbachermed.com

KULMBACHER Kniebandage mit Pelotte **Hinweise für den Patienten/Endverbraucher**

Verwendungszweck:

Die Kulmbacher Kniebandage ist ausschließlich für die Stabilisierung des Kniegelenks und Sicherung des Bandapparates einzusetzen.

Indikation und Wirkungsweise:

Die Stabilisierungsbandage dient der konservativen oder funktionellen Nachbehandlung von Instabilitäten des Kniegelenks.

Auswahl der Größe:

Es gibt 4 Größen entsprechend dem Knieumfang. Es wird der Umfang Kniemitte über Patella (Kniescheibe) gemessen.

Anlegen der Bandage:

Schuhe ausziehen.

Einsteigen in die Bandage

Positionieren der Kniebandage über Mitte Kniescheibe.

Der elastische Ring soll die Kniescheibe umfassen.

Bei längerem Tragen regelmäßig auf mögliche Einschnürungen am unteren oder oberen Rand prüfen

Verwendungshinweise:

Die Knie Bandage ist für rechts und links verwendbar.

Zusammensetzung und Pflegehinweise:

Materialzusammensetzung: 38% Nylon, 13% Polyester, 12 % Gummi, 7% Spandes, 15% TPR (Pelotte), 15 % Stahl (Seitliche Spiralen)

Die Bandage kann mit einer milden Seife und mit der Hand bei 30Grad Celsius gewaschen werden. Nicht über direkter Wärmequelle trocknen.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen

Stauungsödem

Arterielle Gefäßerkrankungen

Bitte konsultieren Sie ihren Arzt!

Wartung/Tragedauer:

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Kompressionswirkung kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach ca. 6 Monaten Tragezeit kann eine neue Bandage indiziert sein. Regelmäßiges Waschen erhöht die Haltbarkeit der Bandage.

Gewährleistung:

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

Konformitätserklärung:

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die KULMBACHER Kniebandage mit Pelotte die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt.

Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623

Fax: 09221/65985 www.kulmbachermed.com

Hersteller: Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

Meldepflicht: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021_05_26

