

KULMBACHER

KNÖCHELBANDAGE mit Pelotte



Silikon-Pelotte für verbesserte

- Massagewirkung
- Durchblutungsförderung
- Resorption von Ergüssen
- Knorpel-Ernährungssituation
- Ödemrückbildung und Schmerzreduktion

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

05.02.01.0059

Indikationen:

- Stabilisierung des Sprunggelenks bei leichter Bandinstabilität
- Myotendopathien im Sprunggelenkbereich
- Überlastungsbeschwerden von Muskeln, Sehnen und Bändern
- Gelenkergüsse und Schwellungen bei Arthrose und Arthritis
- OSG/USG Arthrosen
- Rheumatische Erkrankungen
- Nach Distorsionen
- Posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Prophylaxe von Sprunggelenkverletzungen
- Bei Bänderschwäche zur Prophylaxe im Alltag

Wirkungsweise:

Die nach der anatomischen Fußform gestrickte Knöchelbandage, mit Maschen-Zunahme und -Abnahme, entlastet und stabilisiert das Sprunggelenk durch die eingestrickte elastische Kompression. Die elastische, aber inkompressible Pelotte verteilt den Druck auf das Gewebe um die Knöchel herum. Durch die Kompression wird das Gewebe in der Bewegung massiert und die Durchblutung verbessert. Gelenkergüsse und Schwellungen bilden sich rascher zurück.

Eigenschaften:

- Formgestrickte Bandage, längs- und querelastisch.
- Das Gewebe und die Pelotte stimulieren aufgrund des engen Hautkontaktes Rezeptoren in der Haut, welche Signale an die Mechano- und Propriozeptoren der Muskeln und Sehnen weiterleiten. Als Response auf diesen Reiz ziehen sich die angesprochenen Muskeln zusammen und stabilisieren aktiv das Gelenk (Propriozeptiver Effekt).
- Entlastung, Komprimierung und Stabilisierung des Sprunggelenks.
- Positive Beeinflussung der schmerzhaften, arthrosetyptischen Insertionstendopathien und Kapselreizungen.
- Durchblutungsverbesserung des Gelenkbereichs.
- Verbesserte Ernährungssituation für den Knorpel und beschleunigte Resorption von Ergüssen.

Rezeptierung:

KULMBACHER Knöchelbandage mit Pelotte (Art. Nr. M 128)

Pos. Nr.: 05.02.01.0059

Größeneinteilung:

Es gibt 5 Größen entsprechend dem Fersenmaß:
(h-Maß; Umfang zwischen Ferse und Hochspann)

Größe	Umfang in cm
<input type="checkbox"/> 1 (S)	16-21 cm
<input type="checkbox"/> 2 (M)	21-26 cm
<input type="checkbox"/> 3 (L)	26-31 cm
<input type="checkbox"/> 4 (XL)	31-37 cm
<input type="checkbox"/> 5 (XXL)	37-42 cm

Patienten-Seite Rechts Links



Washbar bei 30° Celsius mit einem Feinwaschmittel ohne Weichspüler. Nicht im Trockner, auf Heizungen oder direkt in der Sonne trocknen. Nicht chemisch reinigen oder bügeln. Den Kontakt mit fett- oder säurehaltigen Mitteln oder Salben vermeiden.
Material: 60% Nylon, 30% Gummi, 10% Spandex
Pelotte: Thermoplastisches Elastomer (TPR)



DIN EN ISO 9001:2000

Zertifiziert

seit
1929

KULMBACHER

SCHÄFTEFABRIK

Luitpoldstr. 13
95326 Kulmbach

Tel. 09221/7 4623 - Fax -659 85
www.kulmbachermed.com

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Knöchelbandage mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. Die Knöchelbandage ist ausschließlich für die oben genannten Indikationen einzusetzen. Ein Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

Gebrauchsanweisung KULMBACHER Knöchelbandage mit Pelotte

Zweckbestimmung des Produktes:

Die Kulmbacher Knöchelbandage mit Pelotte ist ausschließlich für die Stabilisierung des Knöchelgelenks und Sicherung des Bandapparates einzusetzen.

Indikation und Wirkungsweise:

Die zweizugelastische Stabilisierungsbandage dient der konservativen oder funktionellen Nachbehandlung von Instabilitäten des Knöchelgelenks.

Auswahl der Größe:

Es gibt 5 Größen entsprechend dem Fersenmaß. Es wird der Umfang zwischen Ferse und Hochspann (h-Maß) gemessen.

Lieferumfang:

Eine Knöchelbandage mit Pelotte, Gebrauchsanweisung, Produktinformation.

Anlegen der Bandage:

Schuhe ausziehen. Einsteigen in die Bandage

Positionieren der Knöchelbandage mit Pelotten neben Innen- und Außen-Knöchel .

Die elastischen Pelotten sollen neben den Knöcheln anliegen.

Bei längerem Tragen regelmäßig auf mögliche Einschnürungen am unteren oder oberen Rand prüfen

Anwendungshinweise:

Die Knöchel Bandage ist in 5 Größen, in rechter und linker Ausführung erhältlich.

Reinigungshinweise und Angabe des verwendeten Materials:

Die Bandage kann mit einer milden Seife und mit der Hand bei 30Grad Celsius gewaschen werden. Nicht über direkter Wärmequelle trocknen.

Materialzusammensetzung: 60% Nylon, 30 % Gummi, 10% Spandex,

Pelotte: Thermoplastisches Elastomer (TPR)

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen

Stauungsödem

Arterielle Gefäßerkrankungen

Bitte konsultieren Sie ihren Arzt!

Wartung/Tragedauer:

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Kompressionswirkung kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach ca. 6 Monaten Tragezeit kann eine neue Bandage indiziert sein. Regelmäßiges Waschen erhöht die Haltbarkeit der Bandage.

Gewährleistung:

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Es wird die gesetzliche Gewährleistung gegeben in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Konformitätserklärung:

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die KULMBACHER Knöchelbandage mit Pelotte die grundlegenden Sicherheits-und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt. Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623

Fax: 09221/65985 www.kulmbachermed.com

Hersteller: Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

Meldepflicht: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021_05_26

