

# KULMBACHER



mit Pelotte Art.-Nr. M 175



ohne Pelotte Art.-Nr. M 176

## MITTELFUSSBANDAGE

mit Pelotte HMV Pos.-Nr. **05.01.01.0014 / 05.01.01.2002**

### 1) Größeneinteilung

Meßpunkt: Umfang Vorfuß hinter dem Ballen in cm. (dicht hinter dem Gelenk der kleinen Zehe)

Größe:  2  3  4  5  6  7  8

Umfang: 19 20 21 22 23 24 25 cm

Links und rechts verwendbar.

### 2) Warum:

Durch schlechtes, nicht passendes Schuhwerk in Verbindung mit einer Bindegewebsschwäche kann es zu einer Verbreiterung des Vorfußes und Zerstörung des queren Fußbogens (sog. Spreizfuß) kommen.

### 3) Indikationen

- Chronische Spreizfußbeschwerden - Leichte Distorsion des Mittelfußes - Leichte Formen des Hallux Valgus

### 4) Wirkungsweise:

Elastische Mittelfußbandagen mit Pelotte sind zirkulär komprimierende, elastische Gewebe, die die Bänder des Metatarsalgewölbes und das Metatarsalgewölbe selbst unterstützen. Die Pelotte dient zur Schmerzlinderung bei Spreizfußbeschwerden. Die Bandage komprimiert den Mittelfuß und hebt das Quergewölbe an.

Dadurch wird der Druck auf die Mittelfußköpfchen reduziert und der Vorfuß verschmälert.

### 5) Eigenschaften

Das quere Fußpolster entlastet einfach und zweckmäßig das mittlere Mittelfußköpfchen eines im queren Fußbogen platten Fußes. Die Bandage kann in normal weiten Konfektionsschuhen getragen werden und durch regelmäßige Wäsche treten auch keine hygienischen Probleme auf. Die Bandage ist gegenüber der Schuhzurichtung ein wesentlich kostengünstigeres Instrument der Hilfe bei Mittel- und Vorfußproblemen.

### 6) Rezeptierung:

KULMBACHER Mittelfußbandage mit Pelotte (Art.-Nr. M175)

Pos.-Nr. 05.01.01.0014 / 05.01.01.2002

### 7) Verwendungshinweise

Die Bandage nicht zu eng wählen, da sonst Durchblutungsstörungen auftreten können.

Material-Zusammensetzung: 80% Viskose, 20% Elastodien.

Vor dem Waschen Pelotte entfernen. Waschbar bei 30° Celsius. Gründlich nachspülen, nicht wringen und nur an der Luft trocknen. Handwäsche 30° (Feinwäsche), nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, nicht chloren.

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Mittelfußbandage mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt. Die Mittelfußbandage ist ausschließlich für die oben genannten Indikationen einzusetzen.

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

seit  
**1929**

**KULMBACHER**

SCHÄFTEFABRIK

Luitpoldstr. 13  
95326 Kulmbach

Tel. 09221/74623 · Fax -65985  
www.kulmbachermed.com



# KULMBACHER Mittelfußbandage

## 1) Größeneinteilung

Meßpunkt: Umfang Vorfuß hinter dem Ballen in cm.(dicht hinter dem Gelenk der kleinen Zehe)

Größe: 1 2 3 4 5 6 7 8

Umfang: 18 19 20 21 22 23 24 25 cm

Links und rechts verwendbar.

## 2) Warum:

Durch schlechtes, nicht passendes Schuhwerk in Verbindung mit einer Bindegewebsschwäche kann es zu einer Verbreiterung des Vorfußes und Zerstörung des queren Fußbogens (sog. Spreizfuß) kommen.

## 3) Indikationen

- Chronische Spreizfußbeschwerden
- Leichte Distorsion des Mittelfußes

## 4) Wirkungsweise:

Elastische Mittelfußbandagen mit Pelotte sind zirkulär komprimierende, elastische Gewebe, die die Bänder des Metatarsalgewölbes und das Metatarsalgewölbe selbst unterstützen. Die Pelotte dient zur Schmerzlinderung bei Spreizfußbeschwerden.

## 5) Eigenschaften

Das quere Fußpolster entlastet einfach und zweckmäßig das mittlere Mittelfußköpfchen eines im queren Fußbogen platten Fußes.

## 6) Rezeptierung:

KULMBACHER Mittelfußbandage

Pos. Nr. 05.01.01.00..

## 7) Verwendungshinweise

Die Bandage nicht zu eng wählen, da sonst Durchblutungsstörungen auftreten können.

Material-Zusammensetzung: 80% Viskose, 20% Elastodien.

Vor dem Waschen Pelotte entfernen.

Waschbar bei 30°Celsius. Gründliche nachspülen, nicht wringen und nur an der Luft trocknen.

Piktogramme:

-Handwäsche 30° (Feinwäsche)	-nicht bügeln	-nicht chemisch reinigen	-nicht chloren
---------------------------------	------------------	--------------------------------	-------------------

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die Mittelfußbandage die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt..

Die Mittelfußbandage ist ausschließlich für die oben genannten Indikationen einzusetzen. Ein Garantie kann nur gewährt werden., wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

**Hersteller:** Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

**Meldepflicht:** Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021\_05\_26

