

KULMBACHER



VORFUß- ENTLASTUNGS-SCHUH

- Zur Entlastung und zum Schutz des Vorfußes
- Rechts und Links tragbar
- Gepolstert, leicht, mit Klett
- Durchgehende Sohle

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

31.03.03.5061

Indikationen:

- postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß
- bei Zehenverletzungen und -frakturen
- zur Ruhigstellung und Entlastung des Vorfußes bei Verletzungen unterschiedlicher Genese

Wirkungsweise und Eigenschaften:

Durch die Konstruktion des Entlastungskeils findet eine Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß statt.

Die weite Öffnungsmöglichkeit und die variable Breitereinstellung durch Klettverschlüsse ermöglichen einen bequemen Einstieg.

Die durchgehende Sohle gewährt dem Patienten Schutz von der Unterseite, zum Beispiel vor Stufen oder Straßenschmutz.

Viele Verletzungen und Erkrankungen speziell im Vorfuß machen es nötig den Druck möglichst vollständig von den Metatarsalköpfchen (Fußballen) und Zehen zu nehmen. Dies kann sowohl nach einer Operation als auch zur Therapie, z.B. von diabetischen Geschwüren, der Fall sein. Das Gewicht muss bei einer solchen Indikation vollständig auf der Ferse lasten, während der Vorfuß sicher und druckfrei unterstützt wird. Der Vorfußentlastungsschuh sorgt für eine gezielte Entlastung von Fußballen und Zehen.

Dies garantiert die spezielle keilförmige Sohle, die zur Ferse hin niedriger wird und vorne verlängert ist, so dass der offene Vorfußbereich keinen Bodenkontakt hat. Das Laufen geschieht dadurch ganz über den hinteren Teil des Fußes, was zusätzlich durch die abrollbare Form der Sohle unterstützt wird. Durch Klettverschlüsse ist der Schuh an jede Verbandsgröße anpassbar. Der Schuh kann vollständig geöffnet werden und ist dadurch besonders leicht an- und abzulegen.

Mit den Klettverschlüssen wird er auf die entsprechende Verbandsgröße eingestellt und sicher am Fuß fixiert.

Rezeptierung:

Kulmbacher Vorfußentlastungsschuh

Art. Nr. M 310

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr 31.03.03.5061

Größeneinteilung:

Schuhgrößen

- XS 35-36
- S 37-38
- M 39-40
- L 41-42
- XL 43-44
- XXL 45-46



DIN EN ISO 9001:2008

Zertifiziert

seit
1929

KULMBACHER

SCHÄFTEFABRIK

Luitpoldstr. 13
95326 Kulmbach

Tel. 09221/74623 · Fax -65985
www.kulmbachermed.com

Gebrauchsanweisung KULMBACHER Vorfußentlastungsschuh

Zweckbestimmung des Produktes (Einsatzorte/Zulässige Betriebsbedingungen):

Der Kulmbacher Vorfußentlastungsschuh ist ausschließlich für die Entlastung und den Schutz des Vorfußes einzusetzen.

Indikation und Wirkungsweise:

Der Vorfußentlastungsschuh dient der Ruhigstellung und Entlastung des Vorfußes bei Verletzungen unterschiedlicher Genese. Postoperativ nach Eingriffen am Vorfuß. Bei Zehenverletzungen und –frakturen.

Auswahl der Größe:

Schuh Größe	Größe	Innenschuh Länge in mm	Innenschuh (Weite) in mm	Breite
35-36	XS	230	86	
37-38	S	244	90	
39-40	M	257	94	
41-42	L	272	98	
43-44	XL	286	102	
45-46	XXL	301	106	

Rechts und Links einsetzbar.

Lieferumfang:

Ein Vorfußentlastungsschuh, Gebrauchsanweisung, Produktinformation.

Anlegen des Vorfußentlastungsschuhs (Montageanweisung):

Öffnen der Klettverschlüsse. Einstieg in den Schuh. Die Ferse sollte hinten anlegen. Schließen der Klettverschlüsse.

Anwendungshinweise:

Der Vorfußentlastungsschuh ist in 6 Größen erhältlich. Links und Rechts einsetzbar. Das herausnehmbare Vorderblatt und die durchgehende Fußplatte dienen als Stoßschutz für die Zehen. Der Fuß wird durch eine integrierte Fersenklammer und durch drei anpassbare Klettverschlüsse im Schaft fixiert.

Reinigungshinweise und Angabe des verwendeten Materials:

Der Vorfußentlastungsschuh kann mit einer milden Seife und mit der Hand bei 30 Grad Celsius gewaschen werden. Die Kunststoffteile können mit heißem Wasser abgewischt werden. Verwendete Materialien: Polyester, EVA, Kunststoff/Gummi.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen, Stauungsödem

Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich der Verschlüsse kommt. Diese dürfen nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Jede dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker, Orthopädie-Schuhmacher oder Arzt.

Wartung/Tragedauer:

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Haftung der Klettbander kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach längerer Tragezeit oder häufigem Kontakt mit Schmutz kann eine neuer Vorfußentlastungsschuh indiziert sein. Regelmäßiges Säubern der Klettverschlüsse erhöht die Haltbarkeit des Vorfußentlastungsschuhs.

Gewährleistung:

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Es wird die gesetzliche Gewährleistung gegeben in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Konformitätserklärung:

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass der KULMBACHER Vorfußentlastungsschuh die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt. Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623 Fax: 09221/65985 www.kulmbachermed.com

Hersteller: Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

Meldepflicht: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021_05_26

