

## **Gebrauchsanweisung KULMBACHER Fingerorthese Art Nr M 156**

### **Zweckbestimmung des Produktes (Einsatzorte):**

Die Kulmbacher Fingerorthese Art Nr M 156 ist ausschließlich für die Stabilisierung und Ruhigstellung von Fingern einzusetzen.

### **Indikation und Wirkungsweise:**

Die Fingerorthese dient der Ruhigstellung bei Verletzungen und Erkrankungen von Fingern und nach operativen Eingriffen.

### **Auswahl der Größe:**

Es gibt drei Größen für Erwachsene und eine Größe für Kinder.

### **Lieferumfang:**

Eine Fingerorthese, Gebrauchsanweisung, Produktinformation.

### **Anlegen der Orthese (Montageanweisung):**

Legen Sie die geöffnete Orthese an das Handgelenk und Fingergelenk mit der Schienenseite unter der Hand. Bei Bedarf kann die Alu Schiene in eine gewünschte Form gebogen werden. Legen Sie die zu versorgenden Finger auf die Orthese. Schließen Sie zunächst die Klettverschlüsse im Bereich der Finger, darauf den Klettverschluß am Handgelenk und schließlich den Klettverschluß an der Mittelhand. Bei längerem Tragen regelmäßig auf mögliche Einschnürungen am unteren oder oberen Rand der Klettverschlüsse prüfen

### **Anwendungshinweise:**

Die Fingerorthese ist in 3 Erwachsenen-Größen und in 1 Kinder-Größe erhältlich.

### **Reinigungshinweise und Angabe des verwendeten Materials:**

Die Orthese kann mit einer milden Seife und mit der Hand bei 30Grad Celsius gewaschen werden. Nicht über direkter Wärmequelle trocknen.

Verwendete Materialien: Baumwolle, Polyester, Polyamid, Anpassbare Aluschienen.

### **Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:**

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen

Stauungsödem

Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich der Verschlüsse kommt. Diese dürfen nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Jede dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker oder Arzt.

### **Wartung/Tragedauer:**

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Haftung der Klettbänder kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach ca. 6 Monaten Tragezeit kann eine neue Orthese indiziert sein. Regelmäßiges Waschen erhöht die Haltbarkeit der Orthese.

### **Gewährleistung:**

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Es wird die gesetzliche Gewährleistung gegeben in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

### **Konformitätserklärung:**

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die KULMBACHER Fingerorthese M 156 die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt..

Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623

Fax: 09221/65985 [www.kulmbachermed.com](http://www.kulmbachermed.com)

**Hersteller:** Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

**Meldepflicht:** Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021\_05\_26

