

Gebrauchsanweisung
KULMBACHER Handgelenkorthese Uni Size Art Nr M 150

Zweckbestimmung des Produktes:

Die Kulmbacher Handgelenkbandage Art Nr M 150 ist ausschließlich für die Stabilisierung des Handgelenks und Unterarmes einzusetzen.

Indikation und Wirkungsweise:

Die Stabilisierungsbandage dient der konservativen oder funktionellen Nachbehandlung von Instabilitäten des Handgelenks.

Auswahl der Größe:

Es gibt eine Größe für Erwachsene und eine Größe für Kinder - jeweils für die linke und die rechte Seite des Patienten.

Lieferumfang:

Eine Handgelenkbandage, Gebrauchsanweisung, Produktinformation.

Anlegen der Bandage:

Ziehen Sie die geöffnete Bandage über das Handgelenk. Schließen Sie zunächst den Klettverschluss über dem Daumen und dann die beiden Klettverschlüsse im Handgelenk/Unterarm.

Bei längerem Tragen regelmäßig auf mögliche Einschnürungen am unteren oder oberen Rand prüfen

Anwendungshinweise:

Die Handgelenk Bandage ist in 2 Größen, in rechter und linker Ausführung erhältlich.

Reinigungshinweise und Angabe des verwendeten Materials:

Die Bandage kann mit einer milden Seife und mit der Hand bei 30 Grad Celsius gewaschen werden. Nicht über direkter Wärmequelle trocknen.

Verwendete Materialien: Polyamid, Anpassbare Aluschienen.

Anwendungsrisiken und Kontraindikationen:

Allergische Hautreaktionen und Hautreizungen

Stauungsödem

Achten Sie darauf, dass es nicht zu Einklemmungen der Haut im Bereich der Verschlüsse kommt. Diese dürfen nicht zu fest angezogen werden, um eine Stauung zu verhindern. Jede dauerhafte Druckstelle (Schmerz, Hautrötung) bedarf der Kontrolle durch den Orthopädie-Techniker oder Arzt.

Wartung/Tragedauer:

Bei längerfristiger Anwendung und regelmäßigem Tragen kann es zu einer altersbedingten Reduktion der Haftung der Klettbänder kommen. Dadurch reduziert sich auch die Stabilisierungswirkung. Nach ca. 6 Monaten Tragezeit kann eine neue Bandage indiziert sein. Regelmäßiges Waschen erhöht die Haltbarkeit der Bandage.

Gewährleistung:

Eine Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird. Es wird die gesetzliche Gewährleistung gegeben in der jeweils aktuell gültigen Fassung.

Konformitätserklärung:

Kulmbacher Schäftefabrik erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die KULMBACHER Handgelenkorthese Art Nr M 150 die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen nach Anhang I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt. Kulmbacher Schäftefabrik, Luitpoldstraße 13, 95326 Kulmbach, Tel: 09221/74623

Fax: 09221/65985 www.kulmbachermed.com

Hersteller: Kulmbacher Schäftefabrik Luitpoldstraße 13 95326 Kulmbach

Meldepflicht: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften innerhalb der EU sind Patienten und Anwender verpflichtet, jeden schwerwiegenden Vorfall bei der Anwendung eines Medizinprodukts sowohl dem Hersteller als auch der zuständigen nationalen Behörde (in Deutschland BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) unverzüglich zu melden.

Revisionsstand: 2021_05_26

